

Alapelvek

A BIT Rapid Color PCV TESZTKÉSZLET a parvo- és koronavírus antigének kimutatására szolgál kutyaurülékben, immunkromatográfiás vizsgálati technológiával, további berendezések nélkül. Amikor bármilyen mintát a mintavételi lyukba helyeznek, a kimutatandó anyag a membrán mentén vándorol a mintavételi lyuk alatt adszorbeált parvovírus és koronavírus monoklonális antitestekkel együtt. Ha a parvo- és koronavírus antigén jelen van a kimutatandó anyagban, akkor vörös színreakciót mutat a tesztvonalakban (T1, T2) található antitestekkel kombinálva, ha nem, akkor nem hoz létre színreakciót. A specifikus reakciók megkülönböztetése érdekében a kontrollvonalnak (C) mindig meg kell jelennie, függetlenül a parvo- és koronavírus antigének jelenlététől.

Biztosított anyagok (10 teszt/készlet)

- 10 db BIT RAPID COLOR PCV tesztcső
- 10 db mintacső, amely vizsgálati puffert tartalmaz
- 10 db mintavételi pálcika
- 10 db eldobható cseppentő
- 1 db Használati utasítás

Tárolás és stabilitás

1. A tesztkészletet szobahőmérsékleten (2-30 °C) kell tárolni.
2. Ne fagyassza le.
3. Ne tárolja közvetlen napfényben.
4. A tesztkészlet lejárati dátuma a külső csomagoláson feltüntetett dátum.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

1. Kizárólag in vitro állatorvosi diagnosztikai használatra.
2. Ne használja a tesztkészletet, ha a tasak sérült vagy a lezárás fel van törve.
3. A tesztet azonnal végezze el, miután kivette a tesztcsőket a fóliatasakból.
4. Minden mintát külön cseppentővel kell kezelni.
5. Ne használja fel újra a tesztkészletet.
6. Ne nyissa ki és ne vegye ki a tesztkészletet az egyedileg lezárt csomagolásból közvetlenül a felhasználás előtt.
7. Viseljen védőkesztyűt a minták kezelése közben, és utána alaposan mosson kezet.
8. Fertőtlenítse és ártalmatlanítsa az összes mintát, tesztcsőket és a potenciálisan szennyezett anyagokat.
9. Ne használja a tesztet lejárati időn túl.

Mintavétel és -előkészítés

A teszt mintája kutyaurülék. A mintát a gyűjtés után azonnal meg kell vizsgálni. Ha a mintát nem vizsgálják meg azonnal, akkor hideg helyen (2-8°C) kell tárolni, 48 óránál hosszabb tárolás esetén pedig -20°C alatt.
A vizsgálat előtt minden mintát és a tesztcsőket szobahőmérsékleten kell tárolni.

Vizsgálati eljárás

1. Nyissa ki a fóliatasakot, és helyezze sík, száraz felületre.
2. Gyűjtse a mintákat a kutyaurülékből a mintavételi pálcikával.
3. Helyezze a pálcikát a mintacsőbe.
4. A tamponmintákat jól keverje össze a vizsgálati hígítószerrel.
5. Vegye ki a pálcikát, és várjon egy percet, amíg a részecskék leülepednek.
6. Cseppentsen három (3) csepp (100 µl) összekevert mintát a mintavételi nyílásba az eldobható cseppentővel.
7. A piros sáv megjelenik az ablakon, és 5-10 perc múlva leolvashatja az eredményt.
8. NE olvassa le a teszt eredményét 10 perc elteltével.

Forgalmazó:



6724 Szeged, Tündér utca 13. TT. 10.



+36 30 797 3603
rendeles@tizaforte.com

A teszt értelmezése

Egy színes sáv jelenik meg az eredményablak kontrollvonalában (C), jelezve, hogy a teszt megfelelően működik. Az eredményablak tesztvonalában (T1, T2) található másik színes sáv ateszt eredményeit jelzi.


1. Negatív

A kontrollvonalon (C) megjelenő piros sáv csak negatív eredményt jelez.



2. Koronavírus pozitív

A kontrollvonalon (C) és atesztvonalon (T2) megjelenő piros sáv egyaránt pozitív eredményt jelez.

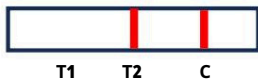

3. Parvo pozitív

A kontrollvonalon (C) és atesztvonalon (T1) megjelenő piros sáv egyaránt pozitív eredményt jelez.



4. Parvo és koronavírus pozitív


A kontrollvonalon (C) és atesztvonalon (T1, T2) megjelenő piros sáv egyaránt pozitív eredményt jelez.



5. Érvénytelen

Nincs piros sáv a kontroll (C) vonalon, vagy nincs színes sáv sem a kontroll (C), sem a teszt (T1, T2) vonalon. Érvénytelen eredményt jelez. Az érvénytelen eredmények oka lehet az utasítások helytelen betartása, vagy a használt készletek lejáratási dátuma. Javasoljuk, hogy a mintát új tesztkészlettel teszteljék újra.

1

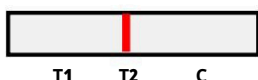

A teszt korlátai

1. Ez a teszt kizárólag in vitro diagnosztikai célra szolgál.
2. Ez a teszt nem képes kimutatni a parvovírus és a koronavírus antigén jelenlétét, ha a minta szintje a vizsgálat kimutatási határa alatt van, vagy az antigén és az antitest nincs jelen a betegség azon szakaszában, amelyben a mintát vették.
3. A negatív eredmény nem zárja ki a közelmúltbeli fertőzést.
4. A kimutatható parvovírus és a koronavírus antigén jelenléte pozitív eredményt jelenthet a parvovírus és a koronavírus fertőzésre. Mint minden diagnosztikai teszt esetében, minden eredményt figyelembe kell venni a rendelkezésre álló egyéb klinikai információkkal együtt, és a végleges klinikai diagnózist állatorvosnak kell felállítania.

Belső minőségellenőrzés

A BIT RAPID COLOR parvovírus és koronavírus antigén kimutatására szolgáló teszteszköz felületén tesztcsík (T1, T2) és kontrollcsík található. membrán, amely az eredményablakon keresztül látható. Sem atesztvonal, sem a kontrollvonal az eredményablakban nem jelenik meg a minták felvitele előtt. A kontrollvonal az eljárás ellenőrzésére szolgál. A kontrollvonalnak mindig meg kell jelennie, ha a tesztet megfelelően végezték el, és a kontrollvonal tesztreagensei működnek.

Csomag

5 teszt/készlet, 10 teszt/készlet, 25 teszt/készlet, 30 teszt/készlet, 50 teszt/készlet



DONG BANG co. LTD

22-75 Goonnaegil, Gosammyeon, Anseong City, Kyeonggido, Korea

Forgalmazó:



6724 Szeged, Tündér utca 13. TT. 10.



+36 30 797 3603
rendeles@tizsaforte.com